
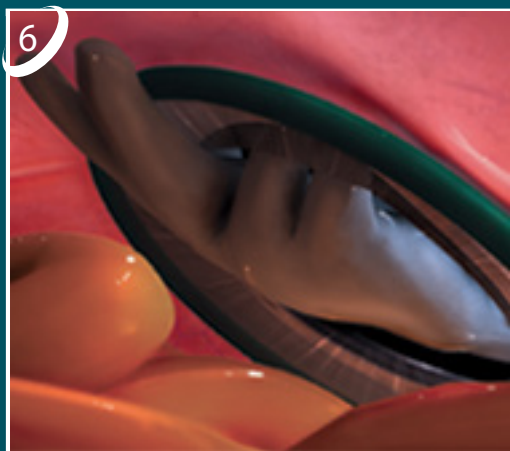
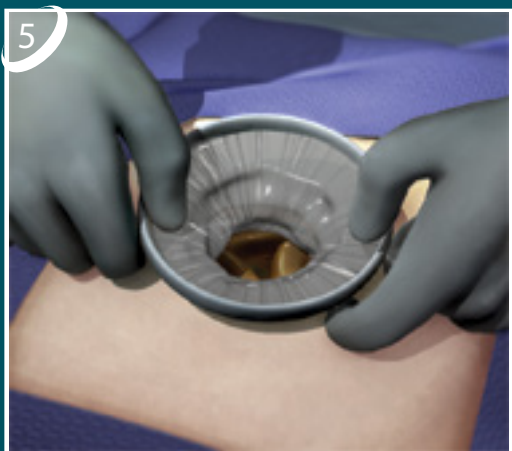
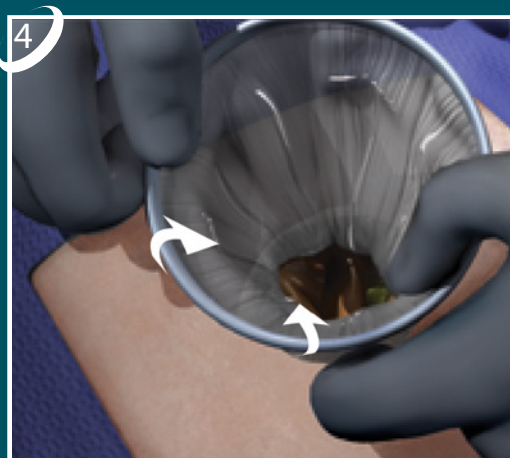
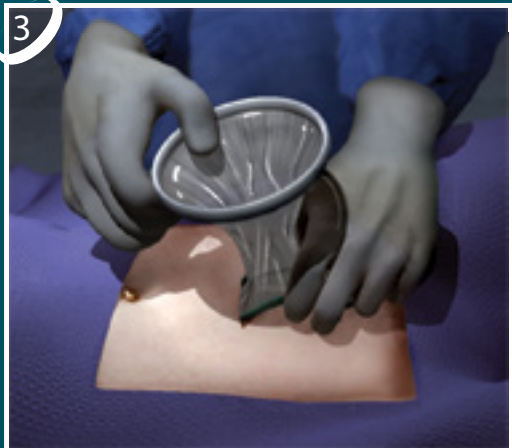
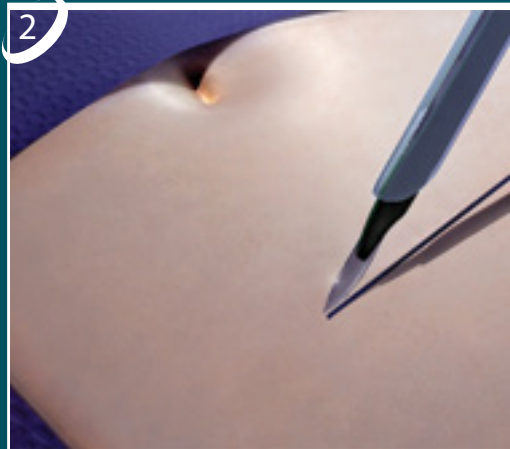


Alexis® O

SEPARADOR QUIRÚRGICO

Guía de colocación*

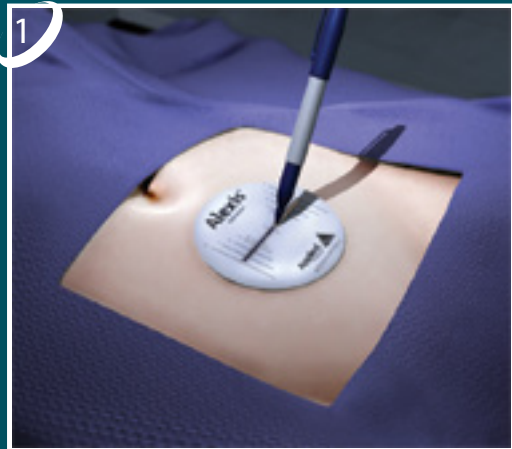

Preparar el campo quirúrgico de acuerdo con el procedimiento estándar, asegurándose que la piel está limpia y seca.

1. Colocar la plantilla sobre el lugar de la incisión, y marcar la longitud apropiada de la línea de incisión utilizando un marcador estéril.
2. Hacer una incisión a lo largo de la línea de incisión marcada.
3. Insertar el anillo verde del Separador quirúrgico Alexis O dentro del lugar de la intervención.
4. Suavemente girar el anillo blanco de retracción del separador quirúrgico Alexis O sujetándolo en la posición 10 y 2 del reloj enrollándolo hacia dentro.
5. Repetir hasta alcanzar la retracción deseada.
6. Cuidadosamente comprobar que no se ha atrapado ningún órgano o tejido.
7. Realizar la cirugía a través de la zona de incisión retraída y protegida 360°.
8. Retirar el separador quirúrgico Alexis O simplemente retirando el anillo interior verde de la cavidad peritoneal.

*Para las instrucciones completas de uso consultar la ficha de instrucciones del mismo.



<http://contact.appliedmedical.com/>

Para más información
www.appliedmedical.com/alexis

Applied
Medical



© 2016 Applied Medical Resources Corporation. Todos los derechos reservados.
Applied Medical, el diseño del logotipo de Applied Medical, ProTerra, el diseño del logotipo de ProTerra y las marcas designadas con el símbolo ® son marcas registradas de Applied Medical Resources Corporation, registradas en uno o más de los siguientes países: Australia, Canadá, Japón, Estados Unidos y / o la Unión Europea. SC01424D-SP